

Техническая спецификация к УЗ ирригатору SI-SA Medisafe

Общая информация

Описание	Медицинский прибор класса I
Область применения	Внутренняя и наружная очистка хирургических инструментов, с полостями внутри и подобных инструментов.
Принцип действия	Ультразвуковое воздействие
Соответствие стандартам	BS2745:часть 1:1993 BS2745:часть 3:1993 EN60101-1:2001 (2 приложение) EN60101-2-045(2001) EN 61326:1997 A1: 1998 EN980

Параметры цикла мытья

Мин. температура во время цикла :	Определяется температурой входящей воды
Мин. температура во время цикла :	**см. запись ниже (ультразвуковое действие также имеет эффект подогрева на 1 – 3°C в течение 15 мин.)
Объём использования химиката :	3E-Zume детергент: приблизительно 160 мл

Условия подключения

Электрообеспечение	
Электропитание :	переменное 230В или 110В, 50 Гц
Потребление мощности :	максимум 0,8 КВА
Подключение :	Стандартная вилка с заземляющим проводом (плавкий предохранитель 13А)
Длина выводных шлангов :	1,83 м. (6 футов)

Водообеспечение	
Подключение горячей воды :	3/4" муфта с наружной резьбой (папа)
Подключение холодной воды :	3/4" муфта с наружной резьбой (папа)
Оптимальное давление :	1,5 бар
Допустимый диапазон давления :	1,5 – 2,5 бар (холодная и горячая вода)
Допустимая скорость потока :	Не менее 2 л/мин.
Эффект низкого давления / низкой скорости потока	увеличивается время наполнения, что удлиняет период полного цикла
Объем, используемый за цикл :	Горячая: около 15 литров Холодная: около 50 литров
Диапазоны температур : *	Горячая: 55 – 75 °C Холодная: 5 – 25 °C
Жесткость воды :	Не более 210 ppm
Замечания :	* 1.Сенсоры температуры не определяют ниже 15°C 2.Температура воды в начале цикла должна быть на 15°C выше запрограммированной температуры моечного цикла (t°C во время мытья 40°C, t°C входящей горячей воды 55°C)

Слив	
Сливное отверстие :	Внешний диаметр 18 мм
Мах. скорость слива :	15 л/мин.
Мах. температура стока :	50 °C
Максимально отводимая теплота :	50 °C

Прибор находится под высоким напряжением.
Не открывайте его во время работы.
Обращайтесь для обслуживания и ремонта только к квалифицированному специалисту.